



【通用名】 胶原贴敷料

【商品名】 丽点胶原贴敷料

【产品简介】

丽点®胶原贴敷料由胶原蛋白溶液和非织造布组成，经过了极为严格的产品技术审查，遵循更严格的产品技术质量标准，具有组织相容性好、致敏性低的特点。产品无菌、无防腐剂、无增稠剂，纯净、安全、可靠。该产品是奥泰康 CDMO 中心基于“MA 解决方案”全流程孵化的首个 III 类医疗器械，是全球首次将医学新材料细胞外基质（ECM）规模化、产业化应用于医美领域的新产品。

【核心成分】 细胞外基质

【级别】 第Ⅲ类医疗器械

【规格】 20mL/袋

【贮藏】 常温运输和常温贮存

【适用范围】 本产品用于为面部激光、光子术后的创面提供愈合环境(激光、光子术后创面深度不超过真皮层)

【使用方法】

- 创面处理:创面常规消毒、清创、止血后,用生理盐水清洗创面。
- 产品使用前须确认包装完整性,以保证无菌状态。产品为一次性使用。
- 取胶原贴敷料贴敷于患处,每天使用 1 次,每次约 30 分钟,连续使用 1 周,然后每周使用 2~3 次,四周为一个疗程。